

XO® 4-1

Quick Guide

Accendere/spengere XO 4 premendo il pulsante verde sulla parte posteriore della base del riunito.

Quando uno strumento é prelevato, viene controllato dal pedale XO – si veda la pagina che segue.

Quando tutti gli strumenti sono in posizione di riposo, il riunito e la poltrona vengono controllati tramite il pedale XO e il Joy-stick XO.

Azionare la **sputacchiera** manualmente mediante  oppure con il pedale XO .

Attivare **il dispositivo di riempimento del bicchiere** mediante  per aggiungere acqua.



I pulsanti  e .

L'aspirazione parte automaticamente, quando si sollevano i tubi dal supporto.

La lampada si accende/spenge senza toccarla grazie ad un sensore "no-touch" posto dietro la lampada. Posizionare la mano nella "zona di attivazione" per meno di 1 secondo, e la lampada si accende/spenge. L'intensità della luce si può regolare mantenendo la mano nella stessa posizione per più di un secondo.

Chiamare **l'assistente** mediante .



Accendere/spengere la lampada senza toccarla.

Il riunito e la poltrona

Posizionare **la poltrona** in posizione 1 mediante  e in posizione 2 mediante .


La prima volta che si attiva , la poltrona va in posizione di risciacquo.

La seconda volta che si attiva , la poltrona va in posizione zero.


Se  viene attivato due volte entro 1 secondo, la poltrona va direttamente in posizione zero.

Per andare all'ultima posizione, utilizzare .

Arresto di emergenza della poltrona: La poltrona si arresta immediatamente premendo uno qualsiasi dei pulsanti sul pedale XO o sul Joystick XO (escluso ).

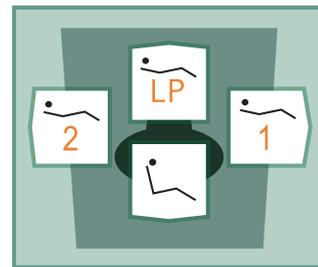

Joystick XO sulla base della poltrona.

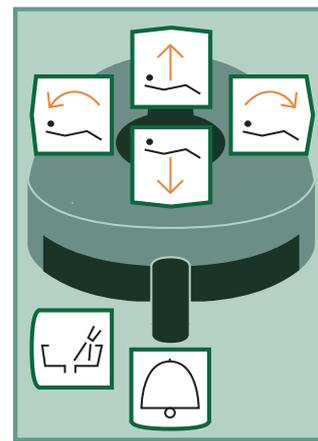

Pedale XO.

-  Posizione 1
-  Posizione 2
-  1.attivazione: Posizione di risciacquo
2.attivazione: Posizione zero
-  Ultima posizione assunta
-  Alzare la poltrona
-  Abbassare la poltrona
-  Alzare lo schienale
-  Abbassare lo schienale
-  Chiamata dell'assistente
-  Attivare / disattivare il risciacquo della sputacchiera
-  Attivare / disattivare riempimento del bicchiere

Micromotore

Quando si preleva il micromotore, il controllo avviene mediante il pedale XO.

Avviare il motore nell'intervallo 250 – 40.000 o/m con  o in  direzione antioraria con

La selezione spray si modifica mediante : acqua e aria, solo aria o senza spray.

Turbina

Quando si solleva la turbina, il controllo avviene mediante il pedale XO.

La turbina si attiva/disattiva mediante  o .

La selezione spray si modifica mediante : spray & aria, o senza spray.

Ablatore

Quando si solleva l'ablattore ad ultrasuoni, il controllo avviene mediante il pedale XO.




Attivare / disattivare l'ablattore mediante  o .

Attivare / disattivare l'acqua di raffreddamento .

Ci sono 3 livelli di raffreddamento: Aumentare il livello mediante . Ridurre il livello mediante .

L'effetto attuale compare sul display.

-  Livello minimo
-  Livello medio
-  Livello massimo

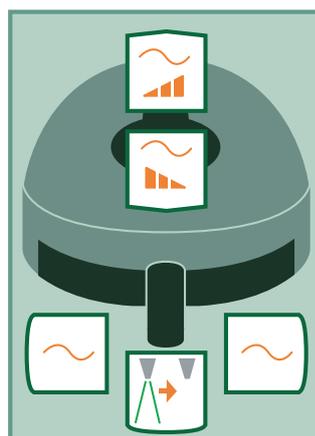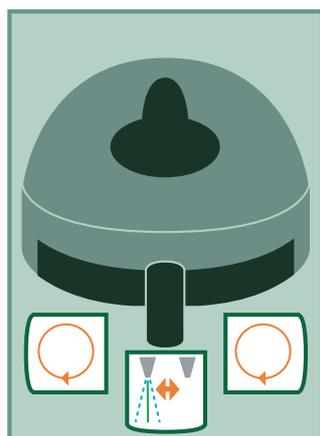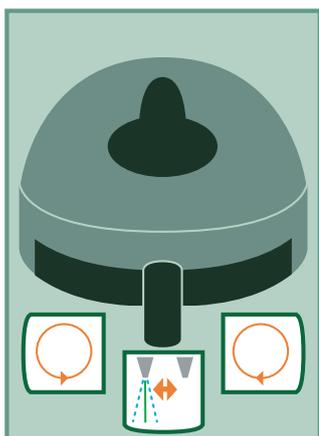

Lampada composita

Quando si solleva la lampada, il controllo avviene mediante il pedale XO.

Il tempo di esposizione è impostato su 20 secondi.

Avviare il processo di indurimento mediante  o .

Si sente un "bip" dopo ogni 10 sec.

Videocamera intraorale

Diversamente dagli altri strumenti del riunito è possibile utilizzare la videocamera intraorale contemporaneamente ad un altro strumento.



Sollevando la videocamera, l'immagine compare sul monitor.

La videocamera è controllata mediante il pedale, quando non sono stati selezionati altri strumenti.

Si può selezionare il fermo immagine o la visione diretta mediante .

Nota: per utilizzare la funzione di fermo immagine è necessario installare l'apposito software sul PC collegato

	Aria e acqua spray
	Acqua spray
	Aria spray
	Senza spray

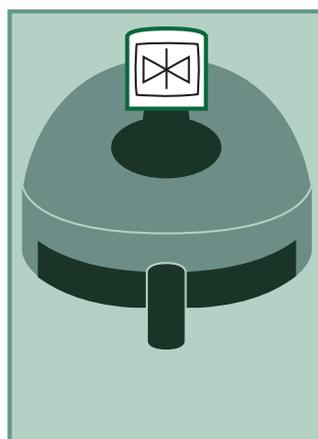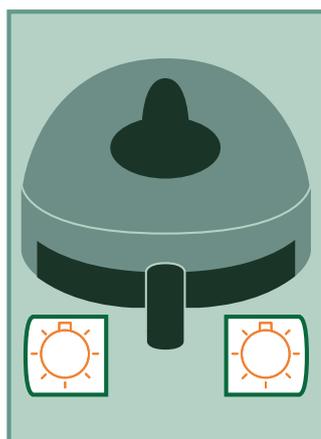

-  Rotazione in senso orario
-  Rotazione in senso antiorario
-  Preselezione spray
-  Attivare / disattivare l'ablatore
-  Attivare / disattivare l'acqua di raffreddamento all'ablatore
-  Aumentare il livello di potenza / ablatore
-  Ridurre il livello di potenza / ablatore
-  Attivare la lampada composita
-  Cambiare fermo immagine / visione diretta / videocamera

Manutenzione Procedure igieniche

Se il pedale XO scivola sul pavimento quando viene attivato:

Pulire con della benzina i piedini in gomma sotto il pedale.

Di mattina prima del primo paziente

1. Concludere la disinfezione del sistema idrico del riunito:

- Controllare che gli strumenti del riunito siano ancora sul supporto strumenti della sputacchiera
- Accendere il riunito
- Il sistema idrico viene risciacquato con un liquido disinfettante
- Controllare lo stato sul display

2. Assicurare che i seguenti componenti siano sterili/disinfettati/nuovi:

- Supporto strumenti
- Strumenti del riunito
- Bicchiere
- Maniglia sulla faretra, lampada e monitor
- Filtri di aspirazione e carter ugelli di aspirazione.

Dopo ogni paziente

1. Rimuovere i componenti contaminati:

- Strumenti del riunito
- Supporto strumenti
- Bicchiere
- Maniglia sulla faretra, lampada e monitor

2. Pulire e disinfettare le superfici

3. Assicurare che i seguenti componenti siano sterili/disinfettati/nuovi:

- Supporto strumenti
- Strumenti del riunito
- Bicchiere
- Maniglia sulla faretra, lampada e monitor

Di sera, dopo l'ultimo paziente

1. Disinfettare il sistema di aspirazione:

- Attivare 
- Attaccare i due tubi di aspirazione sui raccordi disinfettanti
- Attivare 
- Controllare lo stato sul display

2. Rimuovere i componenti contaminati:

- Strumenti del riunito
- Supporto strumenti
- Bacinella della sputacchiera, trappola dell'oro e il portabicchiere (ruotare il rubinetto della sputacchiera prima di rimuovere la bacinella)
- Maniglia sulla faretra, lampada e monitor
- Filtri di aspirazione e carter ugelli di aspirazione

3. Pulire e disinfettare le superfici del riunito e della poltrona

4. Assicurare che i seguenti componenti siano disinfettati:

- Sputacchiera, trappola dell'oro e il portabicchiere (dopo aver riposizionato la bacinella, riportare il rubinetto della sputacchiera nella posizione corretta)

5. Iniziare la procedura di disinfezione del sistema idrico:

- Posizionare tutti gli strumenti sul supporto strumenti della sputacchiera
- Premere  per svuotare il serbatoio di espansione d'acqua
- Spegnerlo e lasciare tutti gli strumenti sul supporto strumenti della sputacchiera.



Disinfezione del sistema idrico.



Tubi di aspirazione posizionati sugli ugelli di disinfezione.



La sputacchiera è estraibile.



Componenti XO 4 autoclavabili (134°C)



Componenti che si possono lavare con un termidisinfettante (90°C).



Pulire periodicamente i piedini in gomma sotto il pedale XO con della benzina.

XO[®]

XO CARE A/S
Usserød Mølle
DK 2970 Hørsholm
Denmark
+45 70 20 55 11
info@xo-care.com
www.xo-care.com